
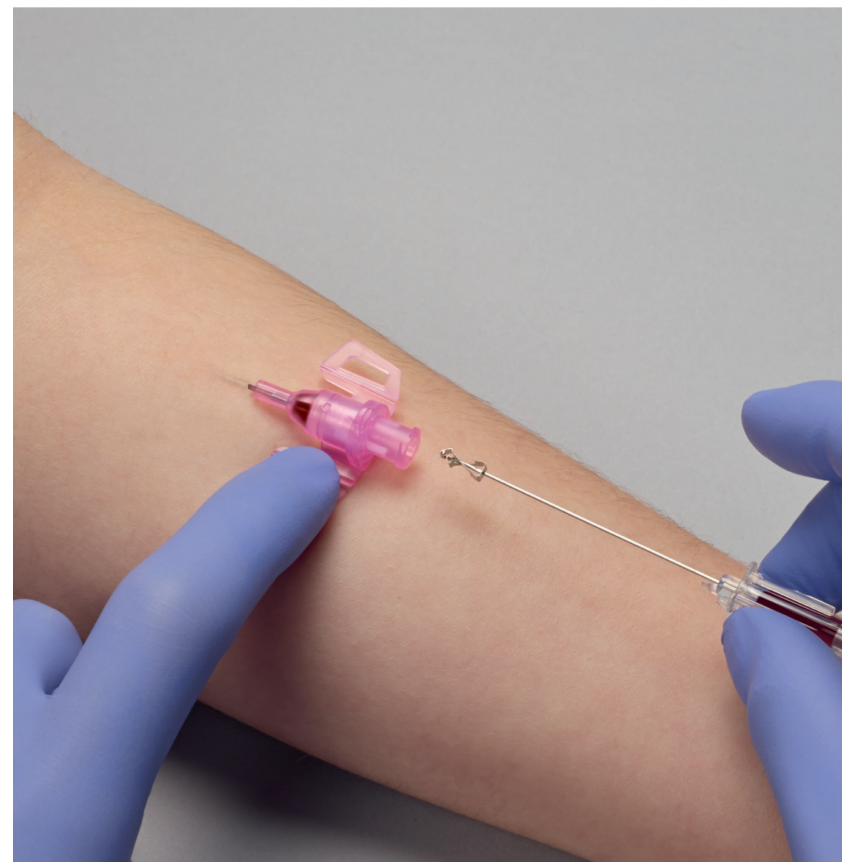


Introcan Safety® 3	Розмір (G)	Довжина катетера		Діаметр катетера мм	Швидкість потоку мл/хв	Швидкість потоку мл/год	Номер за каталогом
		inch	мм				
	24	3/4	19	0,7	22	1320	4251127-01
	22	1	25	0,9	35	2100	4251128-01
	20	1	25	1,1	65	3900	4251129-01
	20	1 1/4	32	1,1	60	3600	4251130-01
	18	1 1/4	32	1,3	105	6300	4251131-01
	18	1 3/4	45	1,3	100	6000	4251132-01

Матеріал катетера Поліуритан (PUR)
Не містить латексу, ПВХ, фталатів (DEHT)
50 шт в упаковці.

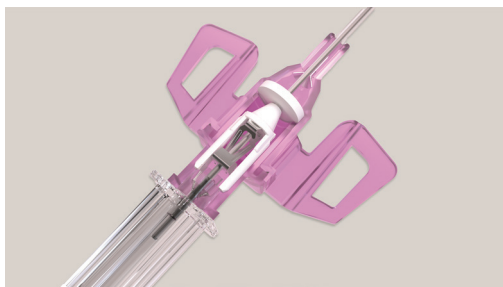

PRESCRIPTION

PATIENT ACCESS

PREPARATION

APPLICATION

DISCHARGE
MANAGEMENT

Introcan Safety® 3

Закритий внутрішньовенний катетер
з перегородкою, що контролює витік крові

Уповноважений представник виробника в Україні:
ТОВ «Б. Браун Медікал Україна»
Україна, 03124, м. Київ, бул. В. Гавела, 6-3
тел.: (044) 351-11-30
e-mail: info.bbmua@bbraun.com
www.bbBraun.ua

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

https://www.bbBraun.ua/ru_ua.html

Introcan Safety® 3

Забезпечує безпечний, більш комфортний та вдалий внутрішньовенний доступ



Забезпечуємо внутрішньовенний доступ...

... Зручність пацієнта

Унікальна геометрія зворотнього зрізу вістря голки допомагає отримати доступ до важких вен, полегшує встановлення катетера, зменшує розриви тканин, сприяючи швидкому загоєнню шкіри та мінімізуючи ризик розвитку інфекції



Універсальний зворотній зріз

- Широкий вибір кутів для постановки
- Розроблений для мінімальної травми проколу
- Введення з меншим розривом тканини



Інжекторні системи

- Підходить для введення контрасту під тиском; максимальний тиск 325 psi (20,7 бар) (G14-G24)



Широке портфоліо

- Пропонуємо широкий вибір розмірів (G14-G24) і довжин катетерів (19-50 мм)

... Безпека пацієнта

Погано зафіксований внутрішньовенний катетер створює ризик ускладнень, таких як зміщення, інфільтрація, екстравазація або флебіт. Інтегрована стабілізаційна платформа з крильцями Introcan Safety® 3 розроблена для мінімізації руху катетера для зменшення ускладнень.



Стабілізаційна платформа

- Створена для покращення стабільності катетера
- Піднята різьба Люера, щоб полегшити з'єднання подалі від шкіри пацієнта

... Безпека медичного персоналу

Травми від уколів голкою залишаються одним із найвищих ризиків, з якими стикається медичний персонал під час повсякденної роботи: 62% травм голкою виникають під час утилізації, після проведення катетеризації. Дослідження показують, що пасивні, повністю автоматичні захисні пристрої є найефективнішими для запобігання травмування. Завдяки Introcan Safety® 3 від B. Braun медичний персонал захищений.





Пасивна захисна кліпса

- Спрацьовує автоматично
- Не можна обійти
- Не потребує активації

... Комфорт пацієнта

Катетер з **Поліуритану PUR** порівняно з катетером з тefлону FEP розм'якшується при температурі тіла, що має позитивний вплив на час перебування у вені та знижує ризик розвитку флебіту.

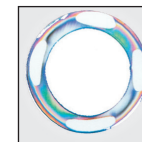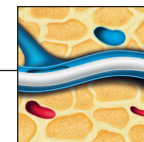


Рентгеноконтрастні смужки

- для хорошої видимості катетера під рентгеном у разі фрагментації катетера

... Зручність для медичного персоналу

Витік крові з внутрішньовенного катетера може статися кожного разу, коли катетер встановлюють, підключають або від'єднують від інших пристроїв. Забруднення кров'ю перериває насичений клінічний процес, що призводить до збільшення часу на очищення та додаткових витрат. Перегородка, що контролює витік крові розроблена для контролю потоку крові з просвіту катетера під час вилучення голки та під час наступних замін пристроїв з допомогою з'єднань Люера.

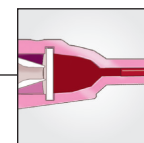


Перегородка, що контролює витік крові

- Запобігає витoku крові
- Працює постійно
- Зменшує потребу у перетисканні вен
- Покращує ефективність процесу

... Успішна катетеризація

Багаторазові спроби встановлення внутрішньовенного катетера можуть привести до затримки лікування. Технологія подвійної візуалізації Introcan Safety® 3 допомагає вдалий пункції з першого разу, шляхом швидкого візуального підтвердження того, що обидва – і голка, і катетер – успішно введені у вену.

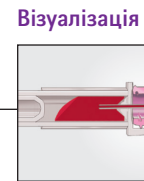

Візуалізація в голці та в катетері

Технологія подвійної візуалізації

- Вдала пункція з першого разу
- Візуалізація в голці підтверджує знаходження голки в вені
- Візуалізація в катетері підтверджує знаходження канюлі в вені

ПЕРЕВАГИ

- Зменшення травм від уколів голкою
- Покращена ефективність катетеризації
- Зменшення забруднень кров'ю під час катетеризації та догляду
- Зменшення ускладнень, пов'язаних з катетером